

everStick® NET '00'

Toile de renfort ép . 60 µm 30 cm²



Indications :

- Attelle post-traumatique vestibulaire ou linguale,
- Renforcements de prothèses provisoires et transitoires
- Renforcement et réparation de P.A.P., P.A.C., orthèse, ...
- Réparation de prothèses, de facettes...
- Tous cas cliniques pour lesquels l'espace est réduit ...

Esthétique et très confortable :

- Transparent et sans métal.
- Très léger et fin. Epaisseur 60µm
- Pratiquement indécélable


Attelle vestibulaire ou attelle post-traumatique



Mesurer la longueur nécessaire. Découper la toile au travers de ses feuilles de protection avec des ciseaux.



Nettoyer soigneusement les dents.

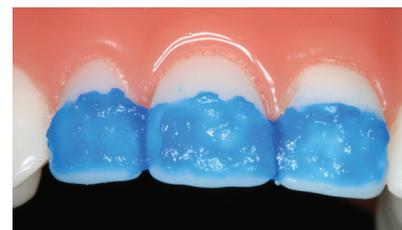


Mordancer à l'acide ortho-phosphorique.



Appliquer l'adhésif, photopolymériser.



Appliquer une fine couche de composite fluide (G-aenial Universal Flo) sans le photopolymériser.

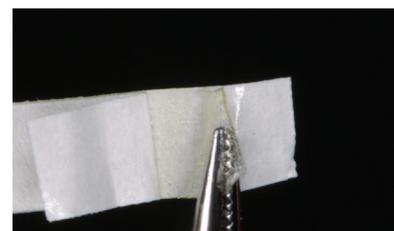

Retirer la bandelette d'everStick®NET des deux feuilles de protection.



Appliquer la bandelette d'everStick®NET sur les dents.



Presser l'everStick®NET dans le composite fluide. Photopolymériser chaque dent en protégeant le reste du renfort de la lumière (Stepper)



Recouvrir d'une fine couche de composite fluide. Photopolymériser.

Exemple : Contention sur dents mobiles et en malposition everStick® NET



Contention sur une patiente présentant des mobilités dentaires et des malpositions importantes. La finesse et la souplesse de la toile everStick NET (ép. 60µm) a permis d'éviter surépaisseurs et sur-contours et d'épouser l'anatomie dentaire sans surcharge. Cas Dr D Estrade